

¿Qué es la HBP?

La Hiperplasia Benigna de Próstata (HBP) es un agrandamiento de la próstata que afecta aproximadamente al 50 % de los hombres a los 60 años, y hasta al 90 % cuando cumplen 85.¹ Este agrandamiento puede comprimir la uretra, reducir el flujo de orina de la vejiga y, a veces, bloquearla por completo.

Entre los síntomas de la HBP se incluyen:

- Frecuencia urinaria
- Flujo irregular
- Necesidad imperiosa de orinar
- Caudal de orina débil
- Esfuerzo
- Levantarse por la noche para orinar

Tratamiento de la HBP

¿No está dispuesto a operarse, pero no quiere tomar medicamentos? La terapia térmica con vapor de agua es una opción que reduce los síntomas de la HBP en pacientes con próstatas agrandadas, sin los efectos secundarios de los medicamentos que tratan esta dolencia.

Hable con su médico para decidir qué tratamiento de la HBP le conviene a usted.

*En función de la situación clínica y la respuesta curativa de cada individuo.

1. Rees J, Bultitude M, Challacombe B. The management of lower urinary tract symptoms in men. *Bmj*. 2014;348:g3861.
2. McVary KT, Gange SN, Gittelman MC, et al. Minimally invasive prostate convective water vapour energy (WAVE) ablation: A multicentre, randomised, controlled study for treatment of lower urinary tract symptoms secondary to benign prostatic hyperplasia. *J Urol*. 2016 May;195(5):1529-38.

La ley estadounidense solo permite la venta de estos dispositivos a un médico o bajo prescripción facultativa. Las indicaciones, contraindicaciones, advertencias e instrucciones de uso se encuentran en la etiqueta del producto suministrada con cada dispositivo. Esta información es para su uso exclusivo en los países en los que el producto esté registrado por las autoridades sanitarias pertinentes. Material no concebido para su uso en Francia. Todas las imágenes son propiedad de Boston Scientific. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

El contenido de este folleto solo tiene fines informativos, no constituye dictamen médico ni debe utilizarse para formular diagnósticos médicos. Boston Scientific le recomienda encarecidamente que consulte a su médico para todo lo relacionado con su salud o para tratar cualquier cuestión clínica o médica.

©2019 Boston Scientific Corporation o sus filiales. Todos los derechos reservados.
URO-645101-AA. Producido por Gosling.
DINURO24095A


**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

CONTENIDO PROPORCIONADO POR BOSTON SCIENTIFIC. BOSTON SCIENTIFIC ES UNA EMPRESA COMPROMETIDA CON LA TRANSFORMACIÓN DE LA VIDA MEDIANTE SOLUCIONES MÉDICAS INNOVADORAS QUE MEJORAN LA SALUD DE LOS PACIENTES DE TODO EL MUNDO.

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

**Un tratamiento
mínimamente invasivo
para la Hiperplasia
Benigna de Próstata (HBP)**

Terapia térmica con vapor de agua

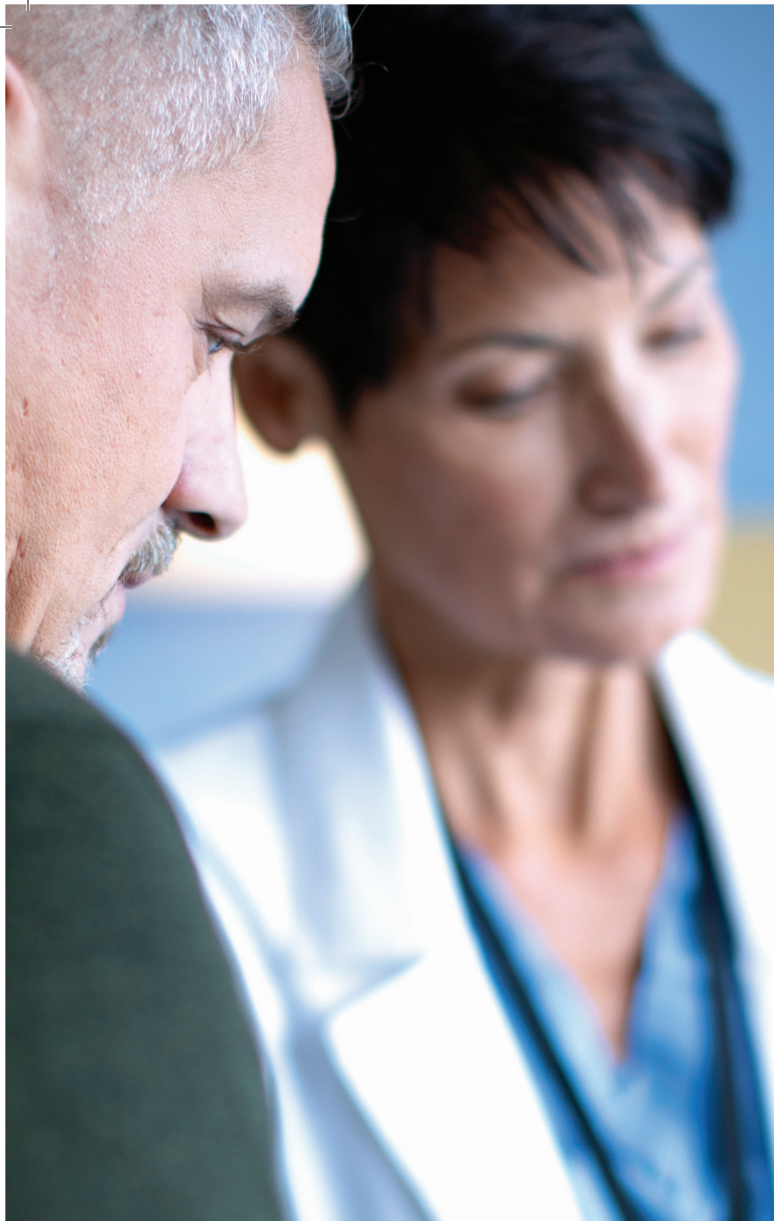

El 90 %

de los hombres de entre
50 y 85 años padecen HBP¹
potencialmente problemática.

24 millones

de hombres en Europa
se ven afectados por la HBP¹




Descubra la diferencia

La terapia térmica con vapor de agua utiliza la energía natural almacenada en el vapor de agua. Los estudios clínicos muestran un perfil de seguridad positivo y la capacidad de aliviar los síntomas asociados a la HBP.²

En cada tratamiento de nueve segundos se emite vapor de agua estéril que se distribuye por el tejido prostático afectado. La transformación del vapor en agua hace que se libere energía, lo que provoca la muerte de las células afectadas.

Al cabo del tiempo, la respuesta curativa natural del cuerpo elimina las células muertas y la próstata reduce su tamaño. La eliminación del tejido adicional abre la uretra y reduce los síntomas de la HBP.

La mayoría de los pacientes comienza a experimentar un alivio de los síntomas al cabo de tan solo dos semanas, y el beneficio máximo puede conseguirse en un plazo de tres meses. Las respuestas de cada paciente pueden variar.

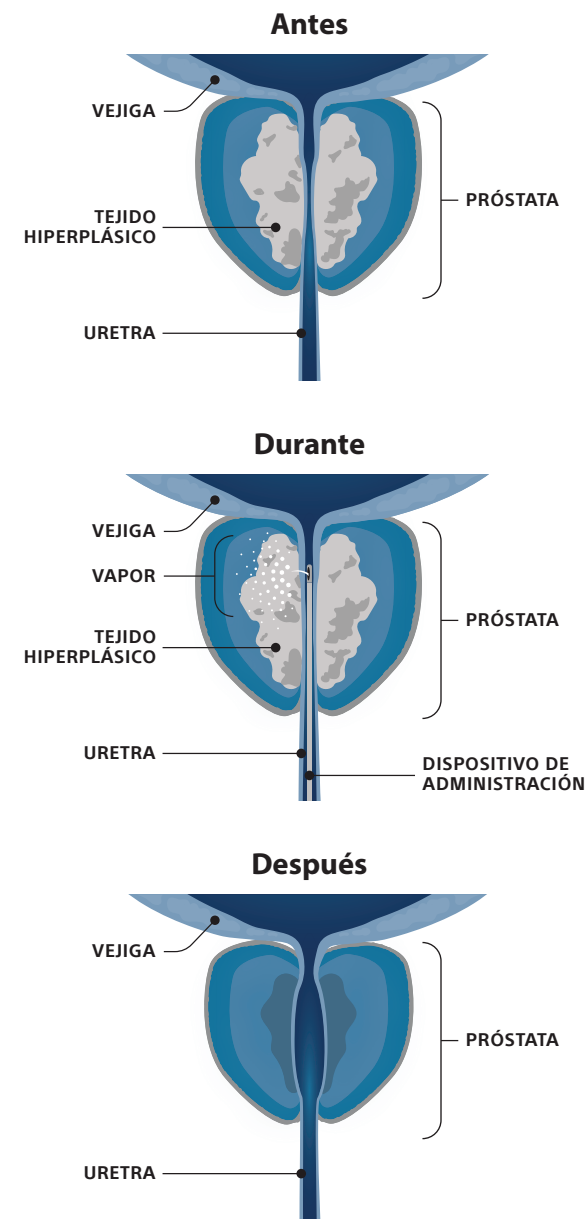

El número de tratamientos de vapor de agua varía según el tamaño de la próstata. La intervención se realiza durante una sola visita. El propósito de las imágenes de arriba es mostrar el funcionamiento de la intervención, no proporcionar una representación exacta de los resultados obtenidos por el paciente.